

# Manual DE ENSAMBLE COMPRESOR

SICOLAB med es un compresor sin aceite especialmente silencioso para el suministro de aire comprimido médico, SICOLAB med suministra aire seco y limpio gracias al secador de membrana integrado y un subfiltro de 0,3 µm.



1

## QUITAR LOS TACOS DEL COMPRESOR

Acostar el compresor y quitar los 4 tacos de goma, los cuales están insertados dentro de la base del compresor con tornillos que están integrados a los mismos tacos, puede ayudarse de una pinza para la extracción del taco.



2

## APOYAR EL COMPRESOR SOBRE LA BASE.

Apoyar el compresor sobre la base, tener en cuenta que los 4 orificios del compresor coincidan con los 4 de la base, para luego colocar los tornillos fijadores.



**LEISTUNG**

# Manual DE ENSAMBLE COMPRESOR

## 3 FIJACIÓN DE COMPRESOR

Una vez colocado el compresor, ajuste los tornillos que soportan al compresor, para ello introduzca desde abajo los tornillos suministrados (4) que fijan el compresor con la base y ajustarlos con una llave 13 mm hasta que se inserten en su totalidad.



Bv. Los Venecianos 6595,  
Córdoba (X5022RWT)  
Tel: 54 0351 4759112/15

Pasteur 721,  
Capital Federal (C1028AAO)  
Tel: 54 011 49542339

### COMERCIAL

54 0351 4759112/15 Int.1/211  
ventas@leistungargentina.com.ar

### COMERCIO EXTERIOR

1 786 326 3936  
sales@leistung-usa.com

### ASISTENCIA TÉCNICA

☎ 54 9 3512383134  
asistencia@leistungargentina.com.ar



Escaneá el código QR para obtener el manual de usuario, o descargalo de nuestra página web en el siguiente enlace:

[info@leistungargentina.com.ar](mailto:info@leistungargentina.com.ar)

[www.leistungargentina.com.ar](http://www.leistungargentina.com.ar)

[www.leistungargentina.com.ar/soporte](http://www.leistungargentina.com.ar/soporte)